
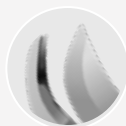



COSTOTOMO

HERRAMIENTA

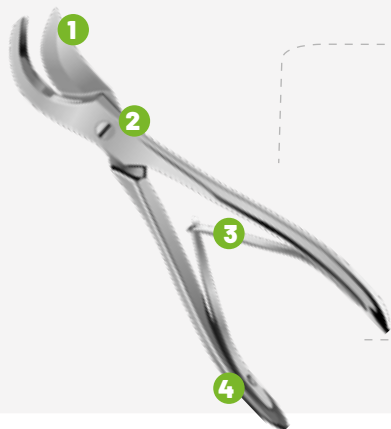


1

Filo

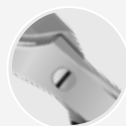

2

Cara útil

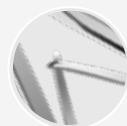

3

Parte media



4

Cabeza

DESCRIPCIÓN Y USOS

El costotomo es un instrumento quirúrgico utilizado para cortar costillas del tipo de una cizalla.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



GAFAS DE SEGURIDAD



MASCARILLA



GUANTES DE LATEX



BATA



GORRO

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

● HERIDAS EN DEDOS Y MANOS

● LESIONES OCULARES POR SALIPICADURA

● LACERACIONES EN DEDOS Y MANOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Recuerde llevar siempre el cabello recogido.
- Antes de iniciar labores debe retirar reloj y accesorios de manos y antebrazos.
- Antes de iniciar el procedimiento realice lavado de manos según protocolo y posterior a ello colóquese los siguientes elementos de protección individual: gafas, mascarilla, gorro, guantes de látex. Manténgalos puestos hasta finalizar el procedimiento.
- Si durante el procedimiento se rompe un guante, este debe retirarse inmediatamente, lavarse las manos y colocarse un nuevo par.
- Sostenga de manera firme el instrumento.
- Antes de la manipulación debe cubrirse las lesiones cutáneas, los cortes y las heridas.
- Debe tener el esquema de vacunación completo de acuerdo al área de trabajo.
- Este instrumento debe ser utilizado por personal capacitado.
- Se debe realizar una adecuada limpieza después de ser usado. Puede soportar técnicas de repetición de esterilización para usos múltiples.
- Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A © Propiedad Intelectual de ARL SURA, 2021.

Línea de atención 01 8000 511 414

arlsura.com