

JERINGA DENTAL

HERRAMIENTA



1 Anillo para dedo pulgar

2 Sujetador para dedos

3 Barril para cartucho

4 Vástago para arpón

5 Adaptador para aguja

DESCRIPCIÓN Y USOS

Las jeringas dentales se utilizan para adaptar cartuchos que contienen 1.8 ml de capacidad. Retiene la aguja mediante un adaptador, y en la parte final del émbolo tiene una lanceta, la cual se incrusta en la parte posterior del cartucho en el tapón de silicón para poder aspirar.

Las partes de la jeringa son: Anillo para el dedo pulgar, sujetador para los dedos, el barril de la jeringa para el cartucho, vástago con arpón y adaptador para la aguja. La aguja permite el paso del anestésico del cartucho a los tejidos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



GAFAS DE SEGURIDAD



MASCARILLA



GUANTES DE LATEX



BATA



GORRO

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- HERIDAS EN DEDOS Y MANOS
- LESIONES OCULARES POR SALPICADURAS
- LACERACIONES EN DEDOS Y MANOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Recuerde llevar siempre el cabello recogido
- Antes de iniciar labores debe retirar reloj y otros accesorios de manos y antebrazos.
- Antes de iniciar el procedimiento realice lavado de manos según protocolo y posterior a ello colóquese los siguientes elementos de protección individual: gafas, mascarilla, gorro, guantes de látex. Manténgalos puestos hasta finalizar la labor.
- Si durante el procedimiento se rompe un guante, este debe retirarse inmediatamente, lavarse las manos y colocarse un nuevo par.
- Sostenga de manera firme la jeringa.
- Antes de la manipulación con la jeringa debe cubrirse las lesiones cutáneas, los cortes y las heridas.
- Tener el esquema de vacunación completo de acuerdo al área de trabajo.
- El cuidado de la jeringa es muy importante, se deben limpiar muy bien las partes desarmables para evitar restos de fluidos además de que debe esterilizarse.
- Use adecuadamente el cartucho para evitar romperlo al momento de presionar.
- Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.
- Describa brevemente las medidas de prevención a tener en cuenta en el uso de las herramientas.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A © Propiedad Intelectual de ARL SURA, 2021.

Línea de atención 01 8000 511 414

arlsura.com