



DESCRIPCIÓN Y USOS:

La Pinza Backhaus de extremos curvos y agudos 1x1 se utiliza para fijar entre sí las compresas que delimitan el campo operatorio.

Es utilizada en cirugía para añadir los campos estériles que delimitan la región anatómica.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Gafas de
seguridad



Mascarilla



Guantes de
látex



Bata



Gorro



CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

▶ Heridas en
dedos y manos

▶ Lesiones oculares
por Salpicaduras

▶ Laceraciones en
dedos y manos

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ Recuerde llevar siempre el cabello recogido
- ✍ Antes de iniciar labores debe retirar reloj y otros accesorios de manos y antebrazos.
- ✍ Antes de iniciar el procedimiento realice lavado de manos según protocolo y posterior a ello colóquese los siguientes elementos de protección individual: gafas, mascarilla, gorro, guantes de látex. Manténgalos puestos hasta finalizar el procedimiento.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ Si durante el procedimiento se rompe un guante, este debe retirarse inmediatamente, lavarse las manos y colocarse un nuevo par.
- ✍ Sostenga de manera firme el dispositivo.
- ✍ Antes de la manipulación debe cubrirse las lesiones cutáneas, los cortes y las heridas.
- ✍ Esquema de vacunación completo de acuerdo al área de trabajo.
- ✍ Si Observa al paciente estuporoso o irritado solicite la colaboración de los compañeros
- ✍ Debe ser utilizado por personal capacitado.
- ✍ Se debe realizar una adecuada limpieza después de ser usado. Puede soportar técnicas de repetición de esterilización para usos múltiples.
- ✍ Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com